


Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com

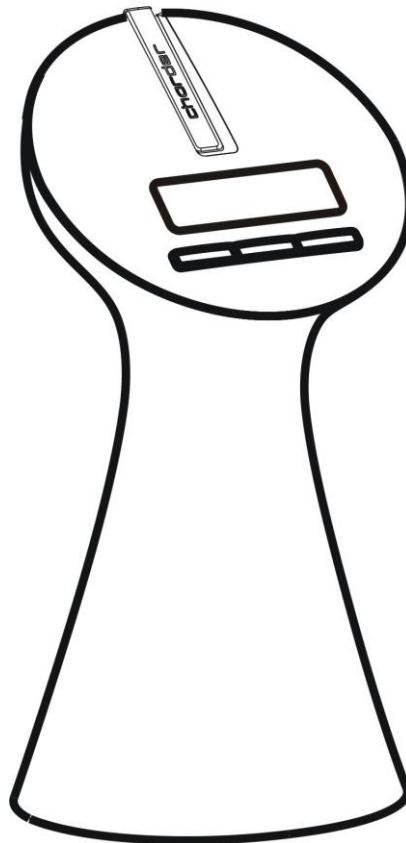

Gebruiksaanwijzing

PMS 4400 Weegunster

Knoppen:

ON/OFF/ZERO

1. Druk hierop om het unster aan te zetten
2. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om het unster uit te zetten.
3. Druk hierop om het unster op 0 te stellen terwijl deze aanstaat.

HOLD

1. Druk op deze knop om de meting vast te zetten.

TARE

1. Druk hierop om het gewicht van een extra object (zoals een luier of kleding) in de houder te tarreren.

Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep

Kwaliteitswaarborg



Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn


Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Gebruik:



1. Maak de schaal klaar.

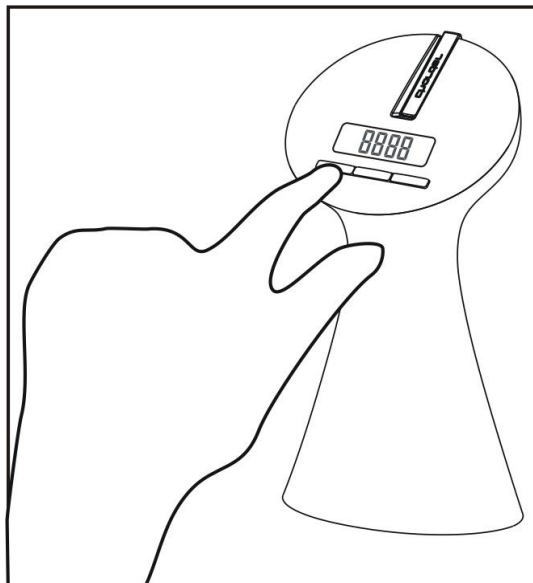

2. Zet de schaal aan met de ON/OFF knop.

Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep


Kwaliteitswaarborg



Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com

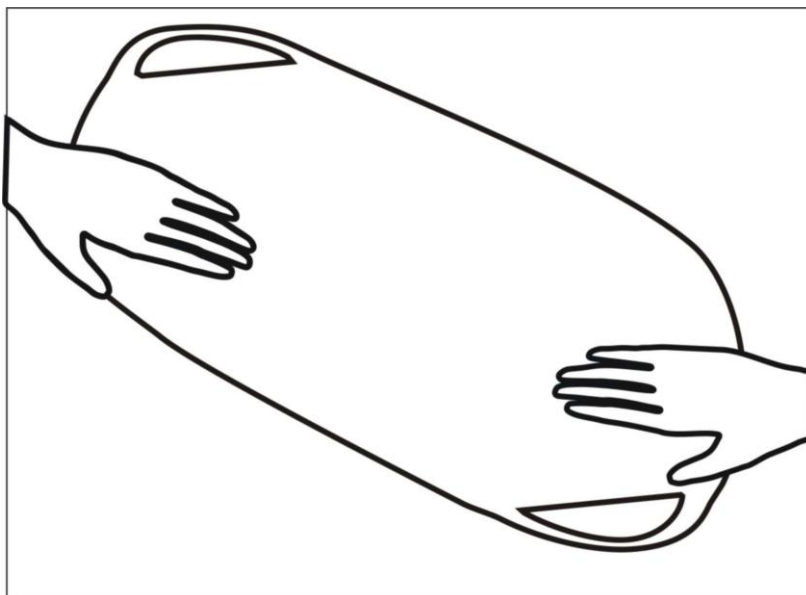

3. Strijk het doek glad.

Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep


Kwaliteitswaarborg




Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com

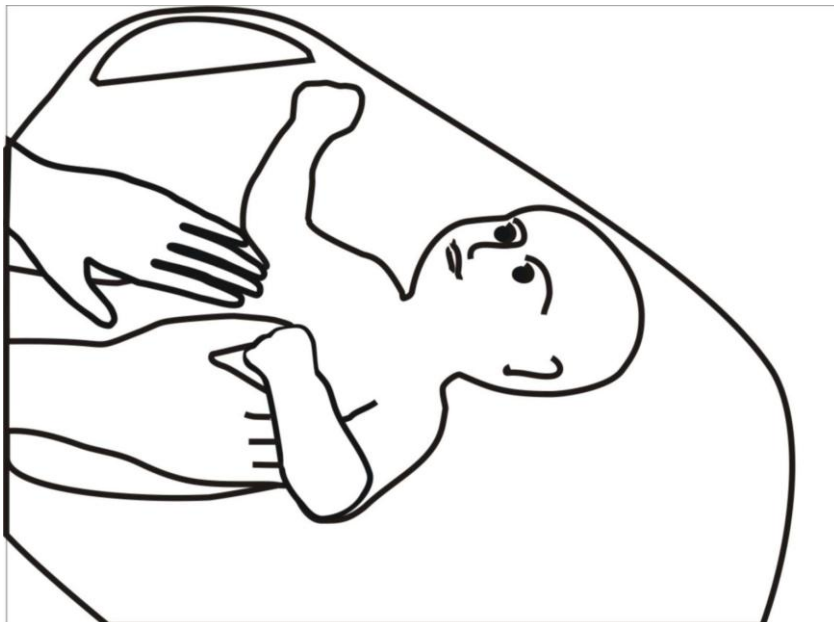

4. Leg de baby voorzichtig op de houder.

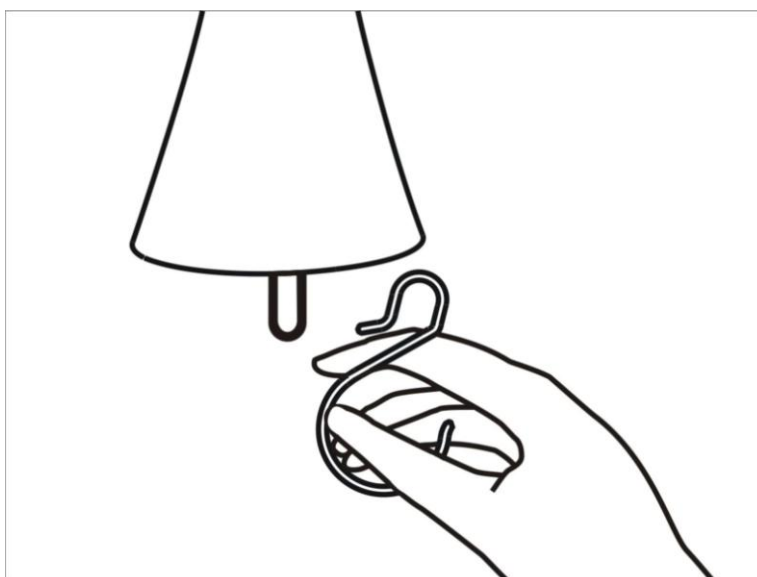

Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep

Kwaliteitswaarborg




Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



5. Hang de haak aan de unster vóór het wegen.

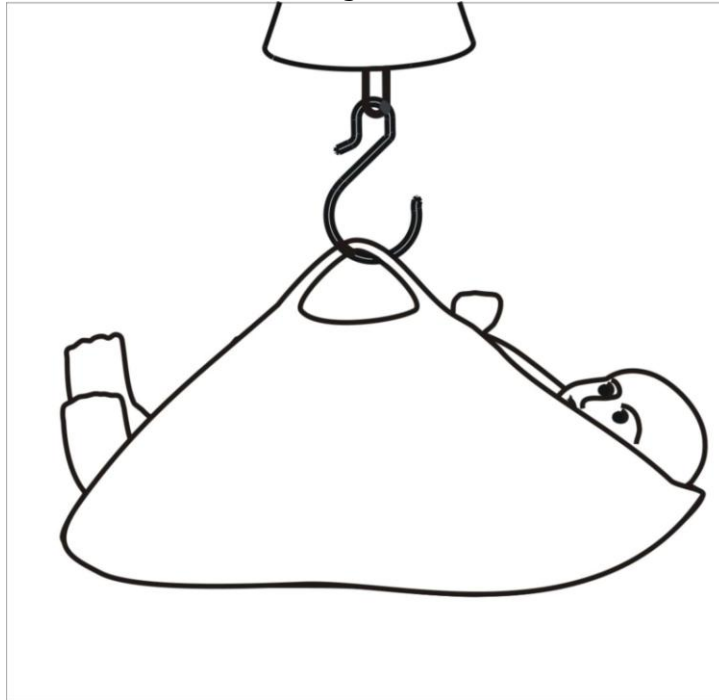


6. Koppel de doek aan de haak en til het geheel voorzichtig op.


Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com

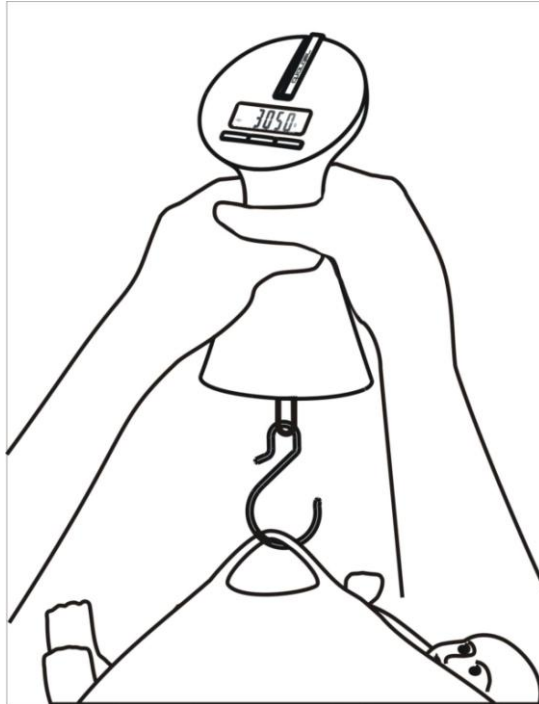

7. Bekijk de meting terwijl u de baby omhoog houdt.

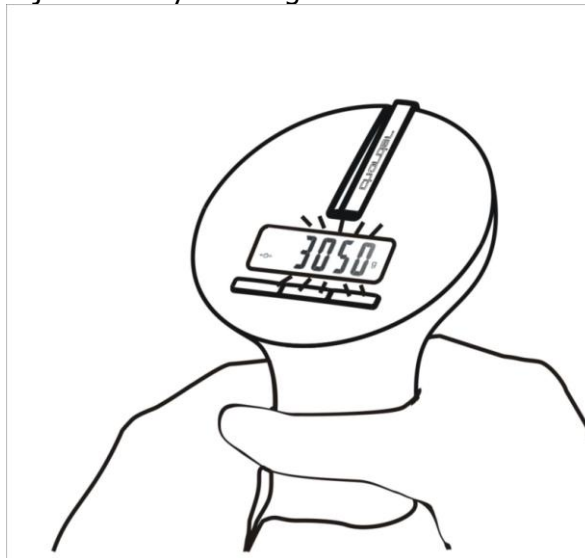

8. Als de meting knippert betekent dit dat deze vast is gezet.

Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep


Kwaliteitswaarborg



Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com

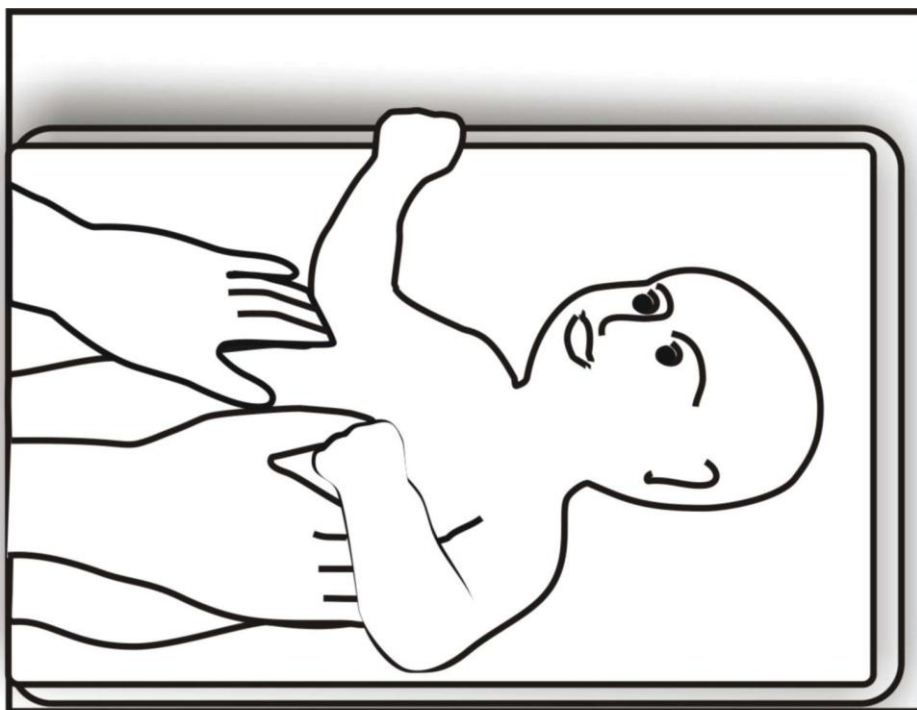

9. Leg de baby voorzigt weer neer en bekijk het resultaat op de display.

Onderdeel van de Unified Weighing Solutions Groep

Kwaliteitswaarborg

