

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Gebruikershandleiding voor de NEO ED serie

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Gebruikershandleiding voor de NEO ED serie

Functietoetsen Omschrijving:

⊖	AAN/UIT toets van de weegschaal
► T ◄	Het tarreren van het gewicht (b.v. handdoek)
► 0 ◄	Voor het nulstellen van de weegschaal
*	Wordt gebruikt als HOLD functie

Werking weegschaal:

- Stap 1:** Druk op de ⊖ toets.
De display zal nu gaan oplichten, en na enkele seconden zal de weegschaal in de nulstand komen.
- Stap 2:** Plaats het te wegen kind op het weegplateau.
- Stap 3:** Lees het gewicht af van de display.
- Stap 4:** Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal ⊖ de toets te drukken.

Tarreren met de ► T ◄ toets:

- Stap 1:** Druk op de ⊖ toets.
Weegschaal komt binnen enkele ogenblikken in de nulstand
- Stap 2:** Plaats het te tarreren gewicht (bv handdoek) op het weegplateau.
Het gewicht wordt nu weergegeven in de display.
- Stap 3:** Druk eenmaal op de ► T ◄ toets.
Het gewicht is nu getarreerd.
De display van de weegschaal zal nu naar nul gaan.

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



- Stap 4:** Plaats het te wegen kind op het weegplateau. Wacht tot het gewicht op de display verschijnt
- Stap 5:** Indien u de tarra wilt opheffen drukt u eenmalig op de ►T◄toets, zodra alles van het plateau is afgenomen.
- Stap 6:** Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de toets te drukken. ⊕

Weegschaal nulstellen met de ►0◄ toets:

- Stap 1:** Druk op de ⊕ toets.
Weegschaal komt binnen enkele ogenblikken in de nulstand
- Stap 2:** Stel dat na enkele wegingen de weegschaal niet op exact op nul terugkomt.
Druk dan op de ►0◄toets en de weegschaal zal weer op de nulstand komen.
- Stap 3:** Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de toets te drukken. ⊕

Wegen met de * toets:

- Stap 1:** Druk op de ⊕ toets.
De weegschaal komt binnen enkele ogenblikken in de nulstand
- Stap 2:** Plaats het kind op het weegplateau.
Het gewicht wordt nu weergegeven in het display.
- Stap 3:** Druk eenmaal op de * toets.
In het display komt de tekst **HOLD** te staan.
Het display zal het gemiddeld gewicht aangeven.
- Stap 4:** Haal het kind van de weegschaal.
De weegschaal zal in de gewone werkstand terugkomen.
- Stap 5:** Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de
⊕ toets te drukken.

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Foutmeldingen:

Error 1 : Zorg ervoor dat wanneer u de schaal aanzet het plateau leeg is.

Error 2 : Bel uw leverancier

Error 10 : Bel uw leverancier

Error 11 : Bel uw leverancier

Error 12 : Bel uw leverancier

Indien u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier.
U kunt ook rechtstreeks contact met de importeur opnemen, telefoon 071-4030101

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



MODEL	ED-1			
CAPACITEIT	3 x 0.001 kg	6 x 0.002 kg	15 x 0.005 kg	30 x 0.010 kg
DISPLAY: GROOTTE:	VFD 5 DIGITS			
DISPLAY FUNCTIES	ZERO en TARA			
MAXIMALE TARRA	-3.000 kg	-6.000 kg	-9.995 kg	-9.990 kg
TEMPERATUUR BEREIK	-10 °C ~ +40 °C			
VOEDING	AC 220V, 50/60Hz			
VERMOGEN	ONG. 10W			
PLATEAU FORMAAT	340 x 215 mm			
PRODUCT FORMAAT	350 x 325 x 105 mm			

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360