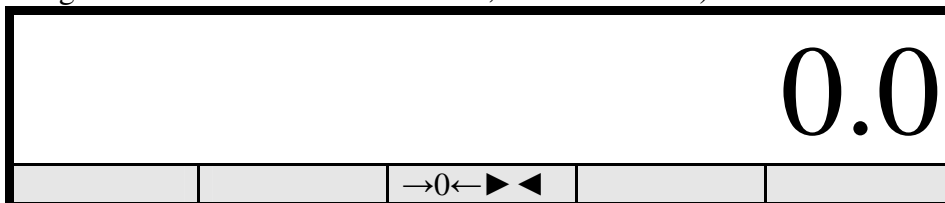


Aanzetten

Druk kort op “Zero” knop

(na de zelftest, eindigend met 1.17 in display, verschijnt onderstaand)

(weegschaal gaat na 1 minuut vanzelf weer uit, dit is instelbaar)

**Wegen**

Druk kort op de “Hold” knop, (tbv automatisch bepalen en vastzetten van gewicht)

Nu verschijnt “Hold” en “Ready”, knipperend in het display

Persoon mag nu gaan zitten en rustig blijven zitten totdat “Hold” stopt met knipperen



Het correcte gewicht staat nu vast op het display (nadat weegstoel leeg is, vervalt het gewicht)

Druk eventueel nog een keer op “Hold” om functie uit te schakelen


**BMI**

Druk kort op de “BMI” knop

Voer nu de lengte in van de te wegen persoon en druk op “Enter”

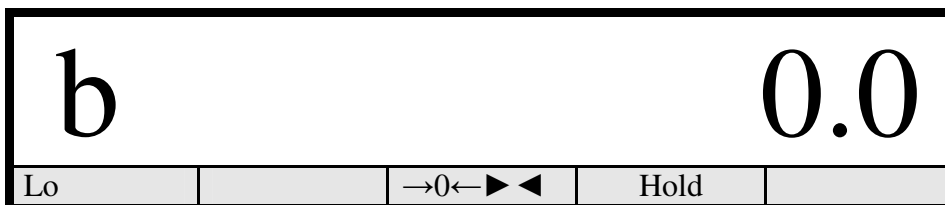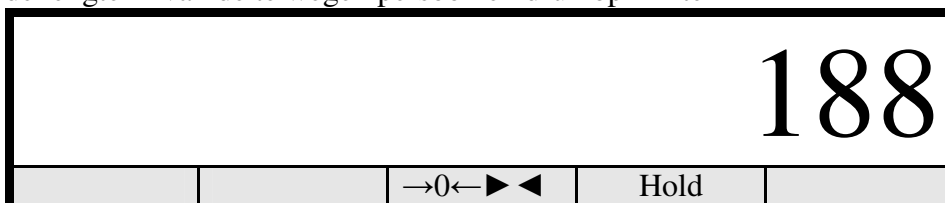

Nu mag persoon gaan zitten en word afwisselend het gewicht en de BMI getoond

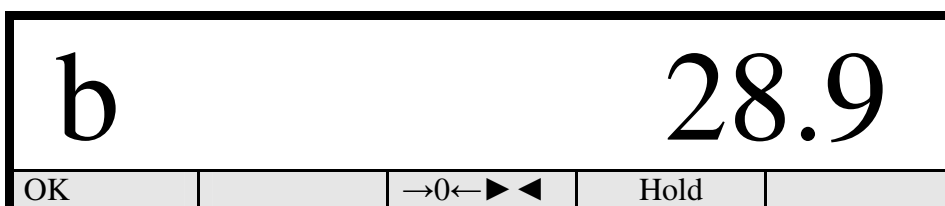

Druk eventueel nog een keer op de “BMI” knop om functie uit te schakelen