

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Gebruikershandleiding voor de GZ 200 serie.

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Functietoetsen: **Omschrijving:**

ZERO	Voor het nulstellen van de weegschaal.
TARE	Voor het in en uitschakelen van het tarra gewicht.
HOLD	Wanneer het gewicht niet stabiel is , laat het display het gemiddelde gewicht zien van 4 seconden.
ON / OFF	Voor het aan- en uitzetten van de weegschaal.

Werking weegschaal:

- Stap 1:** Druk op de **ON/OFF** toets.
De display zal nu gaan oplichten, en optellen van "0" tot "9".
(Om het tellen te stoppen druk op de ZERO toets.)
Zorg dat wanneer u de weegschaal aan zet het plateau leeg is, anders springt de weegschaal op "ERR 1". (Zie foutmeldingen)
- Stap 2:** Stap op de weegschaal.
- Stap 3:** Lees het gewicht af van de display.
- Stap 4:** Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.

Tarreren met de TARE toets:

- Stap 1:** Druk op de **ON/OFF** toets.
Weegschaal komt binnen enkele ogenblikken in de nulstand
- Stap 2:** Plaats de handdoek of matje op het weegplateau.
Het gewicht van de verpakking wordt nu weergegeven in de display.
- Stap 3:** Druk eenmaal op de **TARE** toets.
Het gewicht van het voorwerp nu getarreerd.
De display van de weegschaal zal nu naar nul gaan.
- Stap 4:** Stap op de weegschaal
- Stap 5:** Lees het gewicht af van de display.
- Stap 6:** Indien u de tarra wilt opheffen drukt u eenmalig op de **TARE** toets

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Stap 7: Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.

Wegen met de HOLD toets (gebruiken wanneer het te wegen product onstabiel is):

- Stap 1:** Druk op de **ON/OFF** toets.
Weegschaal komt binnen enkele ogenblikken in de nulstand
- Stap 2:** Stap nu op de weegschaal. Het gewicht wordt nu weergegeven in de display.
- Stap 3:** Druk eenmaal op de **HOLD** toets.
In het display komt nu 2x de tekst **HOLD** te staan.
Na 4 seconden zal de weegschaal het gemiddelde gewicht aangeven.
- Stap 4:** Stap van de weegschaal af.
Weegschaal zal in de gewone werkstand terugkomen.
- Stap 5:** Indien u klaar bent met wegen, kunt u de weegschaal uitzetten door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.

Noot:

De HOLD functie dient u alleen te gebruiken indien de persoon niet stil kan staan. Door gebruik te maken van deze functie, zal de weegschaal een gemiddeld gewicht aangeven.

Auto Power Off functie:

Deze functie maakt het mogelijk om de levensduur van de batterij te verlengen, indien u de weegschaal niet constant gebruikt.
Afhankelijk van de instelling zal de weegschaal 10, 30 of 60 minuten automatisch uitschakelen.
(De waarde "off" betekent dat de weegschaal blijft werken, net zolang de batterijen dit kunnen uithouden)

Instellen van deze functie:

Stap 1: Zorg dat de weegschaal uit is.

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Stap 2: Terwijl u de **ZERO** toets ingedrukt blijft houden, zet u de weegschaal aan door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.
De ZERO toets een paar keer indrukken totdat er AP – XX in de display komt te staan

Stap 3: Door op de **TARE** toets te drukken zal de waarde veranderen.
Afhankelijk van uw voorkeur zet u deze op de gewenste waarde (10, 30 of 60 minuten)
Door op de **ZERO** toets te drukken zal deze waarde automatisch in het geheugen van de weegschaal worden opgeslagen.
De weegschaal zal binnen enkele ogenblikken in de nulstand terechtkomen, waarna deze klaar is voor gebruik.

Backlight functie:

Met deze functie kunt u de achtergrondverlichting van het display automatisch uit laten schakelen na een vooraf ingestelde tijd.

Instellen van deze functie:

Stap 1: Zorg dat de weegschaal uit is.

Stap 2: Terwijl u de **ZERO** toets ingedrukt blijft houden, zet u de weegschaal aan door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.
De ZERO toets een paar keer indrukken totdat er “bl on” in de display komt te staan

Stap 3: Door op de **TARE** toets te drukken zal de waarde veranderen.
Afhankelijk van uw voorkeur zet u deze op de gewenste waarde (“bl 10”, “bl 30”, of “bl off”). De betekenis van deze instellingen wordt beschreven op pagina 10 van de Engelstalige handleiding.
Door op de **ZERO** toets te drukken zal deze waarde automatisch in het geheugen van de weegschaal worden opgeslagen.
De weegschaal zal binnen enkele ogenblikken in de nulstand terechtkomen, waarna deze klaar is voor gebruik.

Brightness backlight:

Met deze functie kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het display instellen.

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Instellen van deze functie:

- Stap 1:** Zorg dat de weegschaal uit is.
- Stap 2:** Terwijl u de **ZERO** toets ingedrukt blijft houden, zet u de weegschaal aan door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.
De ZERO toets een paar keer indrukken totdat er "Brightness" in de display komt te staan
- Stap 3:** Door op de **TARE** toets te drukken zal de waarde veranderen.
Afhankelijk van uw voorkeur zet u deze op de gewenste waarde. De betekenis van deze instellingen wordt beschreven op pagina 10 van de Engelstalige handleiding.
Door op de **ZERO** toets te drukken zal deze waarde automatisch in het geheugen van de weegschaal worden opgeslagen.
De weegschaal zal binnen enkele ogenblikken in de nulstand terechtkomen, waarna deze klaar is voor gebruik.

Printer functie (optie):

Met deze functie kunt u de printerfunctie instellen van een printer die u eventueel kunt aansluiten op de weegschaal via de 9-pins RJ 11 connector achter op de weegindicator.

Instellen van deze functie:

- Stap 1:** Zorg dat de weegschaal uit is.
- Stap 2:** Terwijl u de **ZERO** toets ingedrukt blijft houden, zet u de weegschaal aan door eenmaal op de **ON/OFF** toets te drukken.
De ZERO toets een paar keer indrukken totdat er "noSnd" in de display komt te staan
- Stap 3:** Door op de **TARE** toets te drukken zal de waarde veranderen.
Afhankelijk van uw voorkeur zet u deze op de gewenste waarde (K-Snd, S-Snd, U-Snd of C-Snd). De betekenis van deze instellingen wordt beschreven op pagina 10 van de Engelstalige handleiding evenals een uitgebreide beschrijving van de printer optie (pagina 11 t/m 15).
Door op de **ZERO** toets te drukken zal deze waarde automatisch in het geheugen van de weegschaal worden opgeslagen.
De weegschaal zal binnen enkele ogenblikken in de nulstand terechtkomen, waarna deze klaar is voor gebruik.

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-84-4300044
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Foutmeldingen:

In het display kunnen de volgende meldingen komen te staan:

- BATT** De batterijen zijn leeg.
Zodra deze melding in de display komt zal de weegschaal binnen enkele ogenblikken vanzelf uitgaan.
De weegschaal heeft al eerder een melding gegeven in het display rechtsboven de gewichtsaanduiding (symbool halflege batterij).
Alvorens u weer met de weegschaal kunt gaan werken moet u de batterijen vervangen.
- ERR 0** Het gewicht op de weegschaal of de weegschaal zelf is niet stabiel.
- ERR 1** De weegschaal kan zijn nulstand niet vinden.
Stap van het weegplateau af.
Indien deze melding blijft, kunt u als laatste nog controleren of het plateau niet aanloopt.
- ERR 3** De weegschaal is overbelast (er staat meer dan het maximaal toegestane gewicht op de weegschaal). Stap van de weegschaal af.
- ERR 9** Deze melding komt alleen voor als de telfunctie van de weegschaal is ingeschakeld en als er geen gewicht op de weegschaal aanwezig is.

Kwaliteitswaarborg



K.v.K. Den Haag 51480360