


MODEL HOM 2600 KG DIGITALE ROLSTOELWEEGSCHAAL

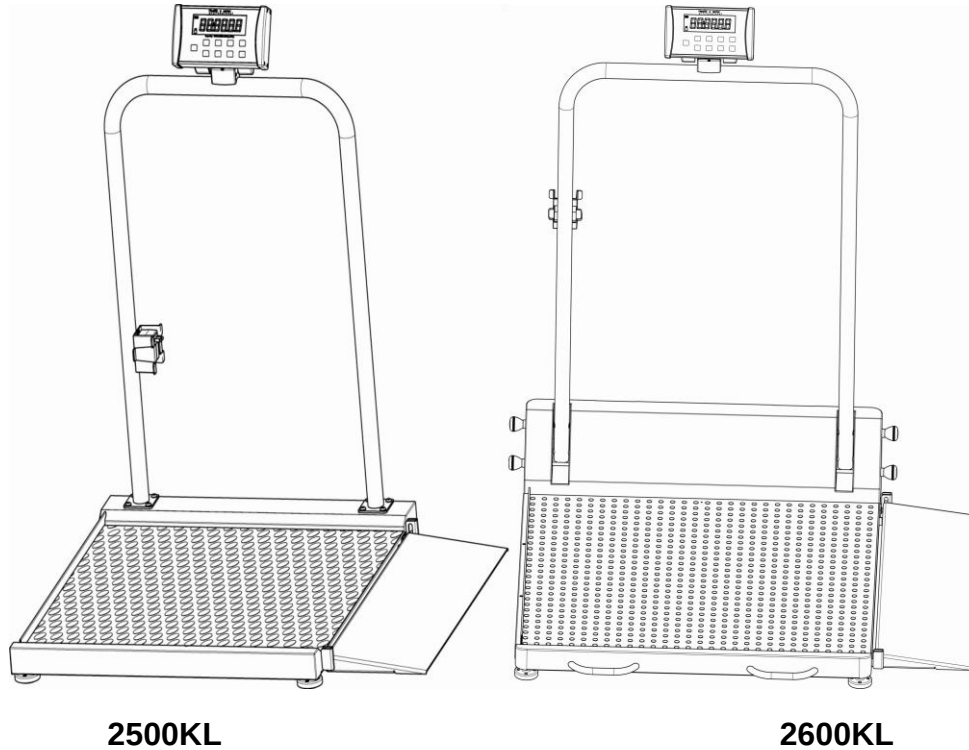

HANDLEIDING

Dank u voor het aanschaffen van dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig en bewaar deze voor later gebruik.

INHOUD

VEILIGHEID.....	3
EIGENSCHAPPEN	4
FUNCTIES.....	5
TARRA.....	6
WEGEN.....	7
BMI.....	8
PROBLEEM OPLOSSEN.....	9

Voor uw garantie registreer uw weegschaal bij :
<http://www.prior-medical.com>

Om handleidingen te downloaden ga naar:
<http://www.prior-medical.com/downloaden>

Veiligheid

- Om letsel en schade te voorkomen, volg de instructies van de handleiding.
- Monteer en gebruik de schaal volgens de handleiding.
- Alvorens de schaal te gebruiken, controleer of de adapter en de aansluiting werken.
- Verzeker u ervan dat de juiste elektrische aansluitingen worden gebruikt.
- De AC adapter en weegschaal moet niet in contact komen met vloeistoffen, extreme temperaturen en extreem hoge vochtigheid.
- Gebruik van verkeerde voltage en aansluitingen kan het product beschadigen en daarmee vervalt de garantie.
- Transporteer de weegschaal niet met een gewicht of ander voorwerp op het platform.
- Voor accuraat wegen, moet de schaal op een vlak, stabiel oppervlak staan.
- Niet gebruiken in de omgeving van brandbare of ontplofbare stoffen.
- Als “Lo bAtt” op het scherm van de indicator verschijnt, vervang de batterijen.

Eigenschappen van de weegschaal

Algemeen

Het model MR 1500 / 400 rolstoelweegschaal gebruikt preciese microtechnologie. Iedere Prior weegschaal is ontworpen om accuraat, betrouwbaar en steeds weer precies te wegen. Ook letten we op eenvoudig, snel en makkelijk gebruik van het produkt.

Het gewicht kan in kg en lbs worden getoond (voorgeprogrammeerd). De display kan 180° draaien om het aflezen zo makkelijk mogelijk te maken. De MR 1500 / 400 heeft 4 wielen.


De weegschaal werkt een adapter (inclusief) of op 6-AA batteries (niet inbegrepen).

MR 1500 / 400 Specificaties

Capaciteit en Indeling	454 kg x 0.1 kg	
Electriciteits eisen	120V-240V AC, 50-60Hz - 9V DC adapter or 6- AA batteries	
Omgevingsfactoren	Werk temperatuur: 10°C to 35°C Opslag temperatuur: 0°C to 50°C Maximum Vochtigheid: 85% rH.	
Afmetingen	Transport Lengte: (92 cm) Breedte: (82.2 cm) Hoogtet:(5.7 cm)	Gemonteerd met oprit en beugel Lengte: (108.5 cm) Breedte: (118 cm) Hoogte: (125.5 cm) Gewichtt: (50 kg)

Handleiding

Keypad

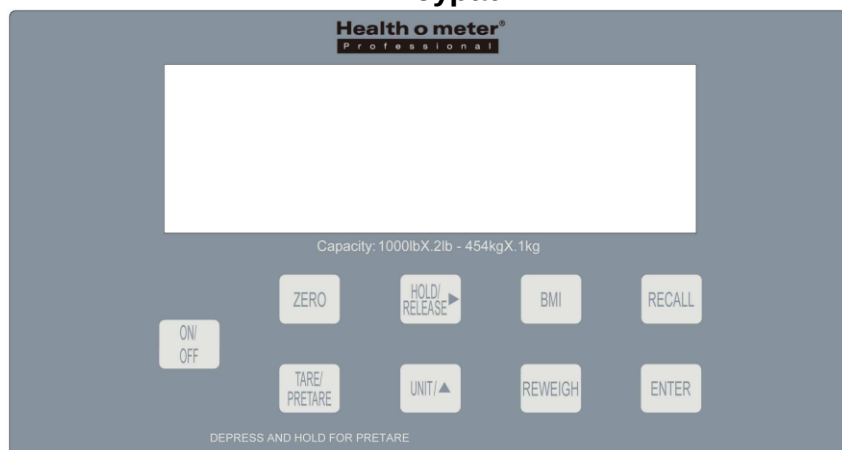

Functie	OmschrijvingDescription
ON/OFF	Aan / uit
ZERO	Stelt de weegschaal op nul voor het wegen.
HOLD / RELEASE ►	Houdt het gewicht van de patiënt vast op het display. Bij opnieuw drukken gaat de schaal naar nul, indien dat niet gebeurt, druk op "zero".
BMI	Om gegevens voor BMI in te geven indien gewenst. (BMI).
RECALL	Toont het laatst gewogen gewicht.
TARE / PRETARE	TARRA- voor het opslaan het gewicht van een tarra object. PRETARE- voor het opslaan van een tarra waarde. Opnieuw drukken om tarra waarde te verwijderen.
UNIT / ▲	Om kg of ponden in te stellen. Kan ook gebruikt worden om lengte of pre tarra aan te passen.
REWEIGH	Opnieuw wegen zonder dat de patiënt van de weegschaal af moet.
ENTER	Om lengte in BMI mode in te geven, en tarra waarde in PRETARE mode. Geeft ook laatst gewogen gewicht en BMI waarde.

Tarra Functie

1. Hierbij wordt het gewicht van b.v. een rolstoel afgetrokken van het total gewicht om het gewicht van de patient te geven.
2. De Tarra Functie doet dit automatisch. Bij de weegschaal kan het tarra gewicht handmatig worden ingegeven, of automatisch zo als beschreven.

Automatisch (druk op Tare knop)

1. Zet de weegschaal aan met de **ON/OFF knop**. Het platform moet leeg zijn
2. Wacht tot "0.0KG" en "ZERO" verschijnen op de display.
3. Plaats de rolstoel op de weegschaal. Het display toont het gewicht van de rolstoel..
4. Druk op de **TARE** knop. De weegschaal keert terug naar nul en het woord "TARE" verschijnt in het midden van de display. Het gewicht van de rolstoel is opgeslagen.
5. Verwijder nu de rolstoel, u ziet nu een negatieve waarde op het scherm.
6. Plaats de patient in de rolstoel, de weegschaal zal automatisch het gewicht van de rolstoel aftrekken.
7. U ziet het gewicht van de patient.
8. Om de tarra waarde te verwijderen druk opnieuw op de **TARE** knop. Zodra het woord "TARE" van het scherm weg is, zal de schaal zijn normale waarde aannemen.

Handmatig Tarra inbrengen (toetsen Entry Tare)

1. Zet de weegschaal aan met de **ON/OFF knop**. Het platform moet leeg zijn
2. Wacht tot "0.0KG" en "ZERO" verschijnen op de display.
3. Druk op de **TARE** knop gedurende 3 tot 5 seconden. Het woord "TARE" zal op de onderkant midden van het scherm verschijnen en nu moet de tarra waarde worden ingetoetst..
5. Gebruik ► en ▲ knoppen om het gewicht van de rolstoel in te voeren. En druk daarna op **ENTER**.
6. u ziet nu een negatieve waarde op het scherm.
7. Plaats de patient in de rolstoel, de weegschaal zal automatisch het gewicht van de rolstoel aftrekken.
8. U ziet het gewicht van de patient.
9. Om de tarra waarde te verwijderen druk opnieuw op de **TARE** knop. Zodra het woord "TARE" van het scherm weg is, zal de schaal zijn normale waarde aannemen.

Handleiding (vervolg)

Wegen van een patient

Opmerking: De weegschaal zal altijd bij het begin de laatst gebruikte eenheid (lb or kg) gebruiken bij de opstart.

1. Zorg er voor dat er niets op het platform staat.
2. Zet de weegschaal aan met de **ON/OFF knop**. Het platform moet leeg zijn
3. Wacht tot "0.0KG" en "ZERO" verschijnen op de display.
4. Plaats de rolstoel op de weegschaal. Het display toont het gewicht van de rolstoel..
5. Druk op de **TARE** knop. De weegschaal keert terug naar nul en het woord "TARE" verschijnt in het midden van de display. Het gewicht van de rolstoel is opgeslagen.
6. Verwijder nu de rolstoel, u ziet nu een negatieve waarde op het scherm.
7. Plaats de patient in de rolstoel, de weegschaal zal automatisch het gewicht van de rolstoel aftrekken.
8. U ziet het gewicht van de patient.
8. Om de tara waarde te verwijderen druk opnieuw op de **TARE** knop. Zodra het woord "TARE" van het scherm weg is, zal de schaal zijn normale waarde aannemen.

Gewicht Recall

1. Het laatst gemeten gewicht kan worden opgeroepen door op de **RECALL** knop te drukken. Om de waarde te verwijderen druk op de **ENTER** knop.

Opmerkingen: Bij de recall functie zal altijd het laatst gemeten gewicht worden getoond. Het gewicht in het geheugen veranderd zodra een nieuwe weging in gedaan.

Handleiding (vervolg)

BMI

Opmerking : De weegschaal calculeert BMI boven de 12 kg. Als de lengte van de patient niet binnen 30 seconden na het indrukken van de BMI knop wordt ingegeven, dan keert de weegschaal terug naar het weegprogramma.

1. Zorg er voor dat er niets op het platform staat.
2. Zet de weegschaal aan met de **ON/OFF knop**. Het platform moet leeg zijn
3. Wacht tot "0.0KG" en "ZERO" verschijnen op de display.
4. Plaats de rolstoel op de weegschaal. Het display toont het gewicht van de rolstoel..
5. Druk op de **TARE** knop. De weegschaal keert terug naar nul en het woord "TARE" verschijnt in het midden van de display. Het gewicht van de rolstoel is opgeslagen.
6. Verwijder nu de rolstoel, u ziet nu een negatieve waarde op het scherm.
7. Na het wegen van de patient, druk op de BMI knop..
8. Het display vraagt de lengte van de patient in te geven. Gebruik de ▲ en ► Knoppen om de lengte in te voeren.

Note: Gebruik inch als er in pounds gewogen wordt.

9. Als de lengte is ingevoerd druk op ENTER.
9. De display toont de BMI van de patient (Body Mass Index).
10. Druk op ENTER om terug te keren naar het normale weegprogramma.

Probleem oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Weegschaal gaat niet aan	Lege batterij Adapter niet aangesloten	Vervang batterijen Sluit AC adapter aan
Schaal gaat niet terug naar zero, of geeft een onlogisch gewicht	Object druk op weegschaal De display toonde geen "0.0" voor het wegen Schaal staat niet vlak Geen goede Tarra	Verwijder het object wat de druk veroorzaakt Vraag de patient van de weegschaal af te gaan, druk op zero en weeg opnieuw Verplaats de weegschaal naar een vlakke vloer Plaats het tarra object op de schaal. Druk REWEIGH. Zodra het gewicht verschijnt druk op TARE. Plaats de patient en de rolstoel weer op de weegschaal en druk opnieuw op REWEIGH
Het wegen duurt te lang en de schaal geeft geen waarde	De patient zit of staat niet stil	Vraag de patient even stil te zitten of staan stil.
het display toont "Over" bericht	Er staat teveel gewicht op de weegschaal (boven het max)	Verwijder het gewicht onmiddellijk. En weeg to max de capaciteit.
het display toont "Lo bAtt" bericht	De batterijen zijn leeg	Vervang de batterijen.