



Prior Medical Systems

Gebruiksaanwijzing




BW-2200

Digitale weegschaal met lengtemeter en
en auto BMI berekening





Onderdelen:

- ① Indicator
- ② Lengtemeter
- ③ Houder
- ④ Buis
- ⑤ Platform
- ⑥ AC kabel
- ⑦ Schroeven

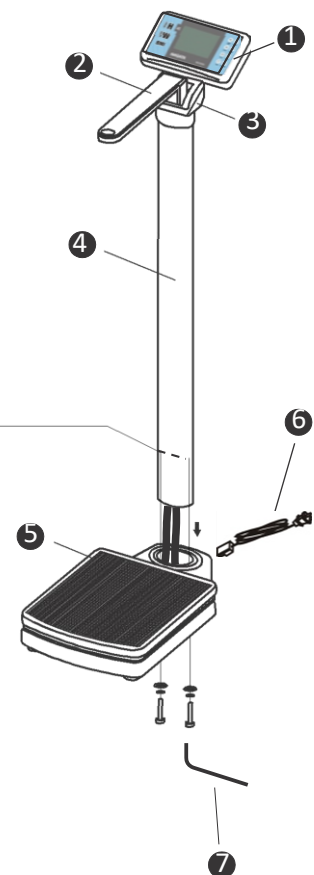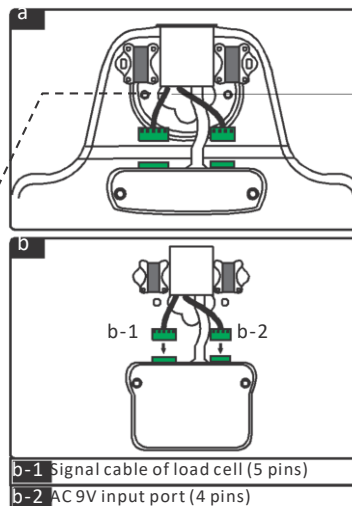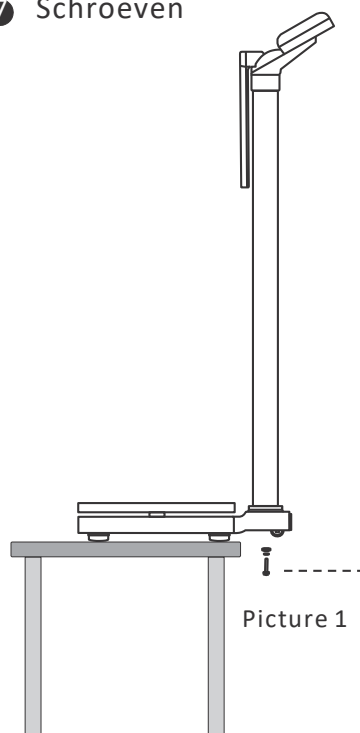


Montage:


- Verwijder alle onderdelen uit de verpakking.
- Zie afbeelding 1 voor de montage van de indicator en het platform.
- Schroef de indicator op de houder. (Afb. a)
- Verbind de kabel tussen het platform en de kolom. (Figure b)
- Schroef de stelvoetjes onder de bodem 2.
- Zet de weegschaal via de 4 stelvoetjes waterpas.
- Als laatste draai de schroef onder de kolom naar beneden tot de vloer, zie afb. 3.

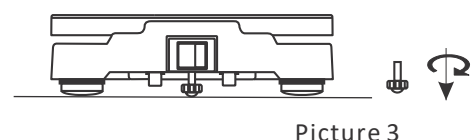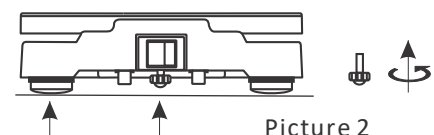

Gebruik van de lengtemeter:

1. Houdt de lengtemeter vast zoals in afbeelding 1.
2. Trek de lengtemeter iets omhoog, afbeelding 2.
3. Klap de hoofdsteun naar voren, afbeelding 3.
4. Schuif de lengtemeter uit door de lat vast te houden, Afbeelding 4. (NIET de hoofdsteun gebruiken om de lat op en neer te bewegen)

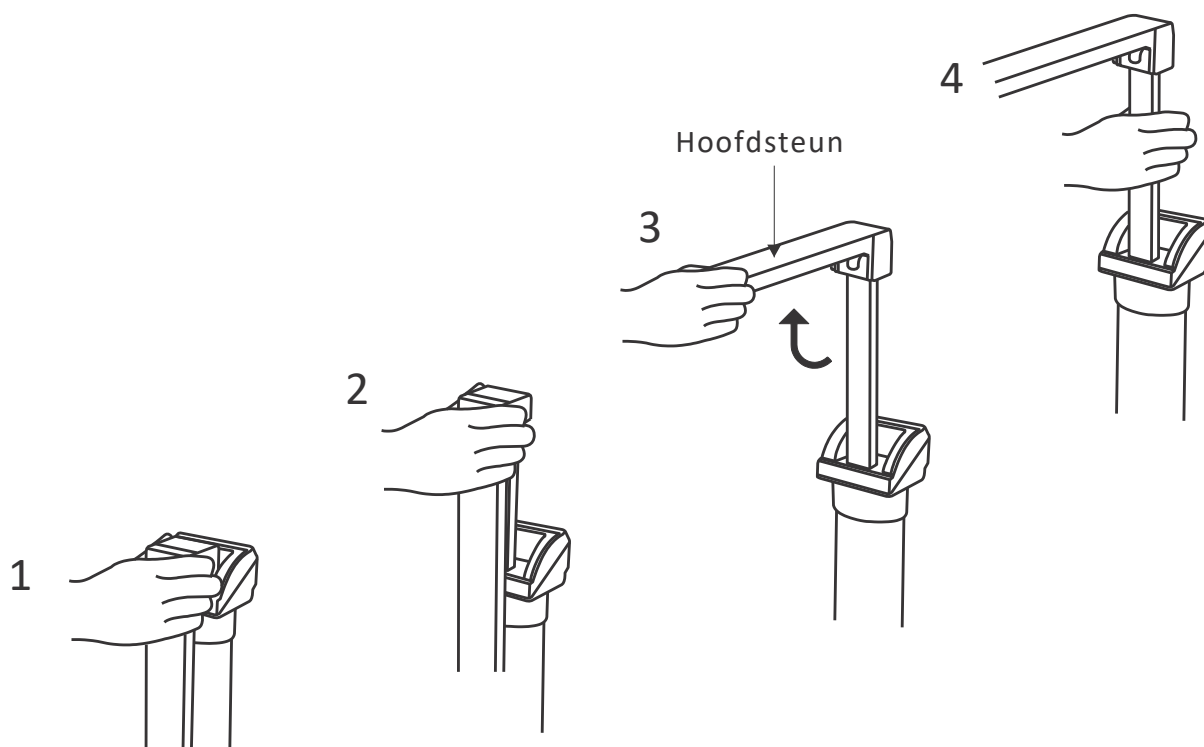

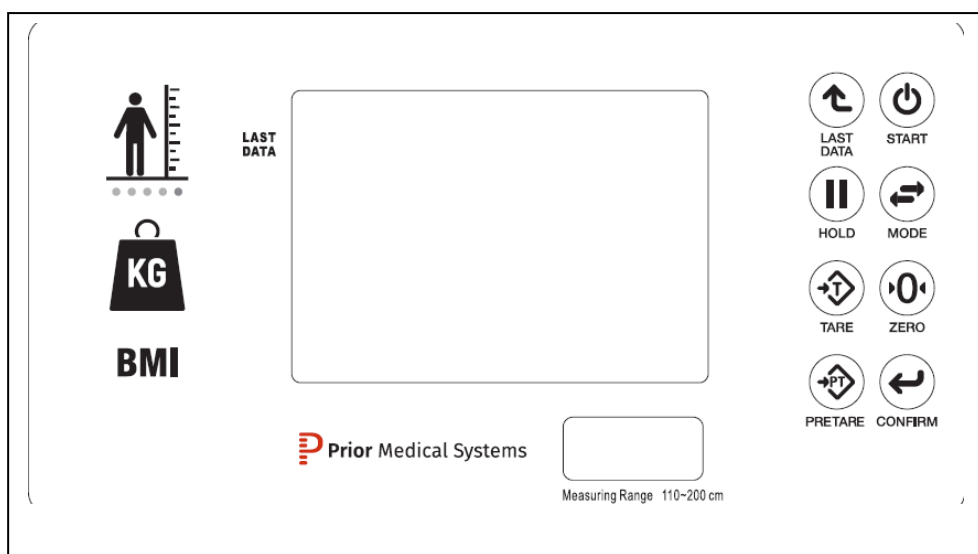

Functies:



Aan / uit knop



Laatste meetgegevens
(lengte/gewicht/BMI)



Hold toets



Tarra



Nul



Meting conversie



bevestiging/back-light functie
(optie: alleen voor printer
gebruik)



Pre-tarra toets

Symbolen op Display:



Laatste gegevens



Stabiel modus.

ZERO

Nul modus aan.

NET

Hold modus auto
O
L
Netto gewicht.

PT

Pre-tarra gewicht.

ft-in lb

Engelse version.

cm/kg

Metrische version.

BMI

Body mass index (BMI).



Batterij capaciteit (als
display knippert, vervang
batterij).



KEY FUNCTION:



START

Druk om aan / uit te zetten.



LAST
DATA

Nadat u hoogte en /of gewicht gemeten heft, kunt u de late meting oproepen. Druk nogmaals om naar de volgende weging te gaan



HOLD

In ZERO modus, druk op deze toets om Auto of Manual Hold Modus te kiezen.

1. Auto Hold Modus:

De weegschaal toont gewicht zodra dit stabiel is.

2. Manual Hold Modus:

Nadat gewicht stabiel is druk op hold.



MODE

Druk om de eenheid van gewicht / lengte te kiezen.(kg/lb)



TARE

1. **TARRA** wordt gebruikt om objecten te tarreren die niet bij het gewicht van de patiënt horen.(e.g. kleding schoen, etc.)

Plaats voorwerp op het platform, druk op toets om gewicht te verminderen. Het display toont 0.0kg en "NET" symbool en dan kunt u wegen.

Als het voorwerp niet aanwezig is op het platform, ziet u een minwaarde. Druk weer op deze toets om de waarde te verwijderen.



ZERO

1. Druk op deze toets om naar het nulpunt te gaan (<+/-2%).

2. als de schuifschakelaar is in "ON" positie en het display toont 0.0,0.00 of 0.000, druk op deze toets tot er een piep klinkt. Dan toont het display de hoogste resolutie.



CONFIRM

1. Bevestig toets

2. BACK-LIGHT (option)

Druk op deze toets tot de volgende commando's verschijnen:

bl OFF = Back-light OFF

bl on = Back-light ON

bl Auto = Automatic back-light-off

3. Als gewicht stabiel is kan deze toets als print commando gebruikt worden.(indien printer gebruikt wordt)

BODY MASS INDEX (BMI):

BMI geeft aan hoe uw gewicht zich verhoudt tot uw lengte. Het een algemene indicatie voor volwassenen. Kinderen, zwangere vrouwen, sporters, mensen boven de 60, kan de BMI afwijken van de gemiddelden.

Body Mass Index, waarden :

1) BMI beneden 18.5

De patiënt heeft een te laag gewicht. Controle van voedingsgewoonten aanbevolen.

2) BMI tussen 18.5 en 24.9

De patiënt heeft een normaal gewicht.

3) BMI tussen 25 en 29.9

De patiënt heeft licht overgewicht. De patiënt zou af moeten vallen als er ook sprake is van bijkomende klachten (zoals diabetes, hoge bloed druk etc).

4) BMI boven 30

Overgewicht. Bezoek uw dokter.

Reinigen :

Zorg bij het reinigen dat de weegschaal uit staat en de stekker uit het stopcontact is.

- 1) Reinig de weegschaal met een klamvochtige (alcohol) microvezeldoek.
- 2) Gebruik geen sterk alkalische of zure produkten.
- 3) Schaal niet in water zetten.

Voor informatie en inlichtingen : info@prior-medical.com