




PMS 3501 W

MS 4200

Medische baby
weegschaal
Gebruiksaanwijzing

INHOUD

LCD SYMBOOL OMSCHRIJVING	2
DISPLAY	2
GEBRUIK WEEGSCHAAL	3
INSTRUCTIE OPLADEN / VERVANGEN BATTERIJ	5
ERROR BERICHTEN	7
PROBLEEM OPLOSSEN	8

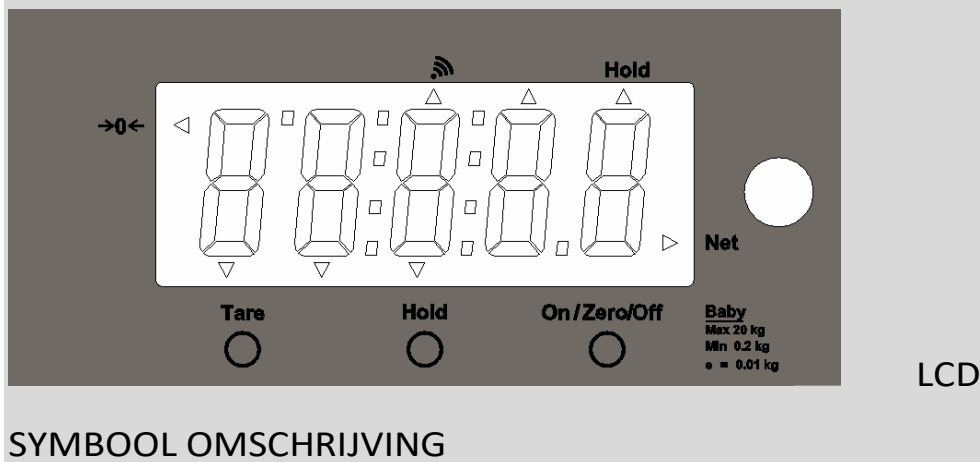

SYMBOL OMSCHRIJVING

DISPLAY

	Nul aanduiding: Als de weegschaal niet een precies 0 aangeeft terwijl en niets op de schaal aanwezig is, druk op de [->0<-] toets. Na een korte wachttijd, geeft de weegschaal nul aan.
	Stabiel teken: Als de display het stabiel teken [o] toont, is de weegschaal in stabiele positie. Zo niet, dan verdwijnt het stabiel teken [o] .
	Hold functie is actief.
	Netto gewicht wordt getoond.
	Verzenden gegevens
	Gewicht op meet moment.
On/ zero / off	Aan / uit, schaal naar 0 stellen

GEBRUIK WEEGSCHAAL

WEGEN

- ♦ Start de weegschaal **[ON/OFF]** toets. De weegschaal gaat door het software programma en test zichzelf. Controle is klaar als software versie verschijnt. Schaal is gereed om te wegen als „0,00 kg” verschijnt.

Opmerking: met de **[→0←]** toets kan de weegschaal altijd op nul worden gezet.

- ♦ Laat de persoon in het midden van de stoel plaatsnemen. Wacht tot het stabiel teken (o) op de display verschijnt en het gewicht wordt getoond.

Opmerking:

Als een persoon zwaarder is als het maximum , dan verschijnt er een „Err” symbool (= overload).

TARREREN

Het gewicht van een additioneel voorwerp kan getarreerd worden door op de “tare” toets te drukken. Daarna wordt alleen het gewicht van de te wegen person getoond.

- ♦ Bijv. Als er een kussen op de weegschaal wordt gelegd, dan toont de weegschaal het gewicht van het kussen.
- ♦ Om het tareren te starten druk op de **[TARE]** toets. Nu wordt het gewicht van het kussen opgeslagen en de **0.0 kg** waarde verschijnt
- ♦ Leg de baby in het midden van de weegschaal.
- ♦ Lees het gewicht op de display.

Opmerking:

De weegschaal kan maar 1 tarra waarde opslaan

Als de weegschaal niet beladen is dan zal een min gewicht getoond worden

Om de tarra waarde te wissen, verwijder ieder voorwerp op de stoel en druk op de **[TARE]** toets

HOLD


Met de Hold functie kan het gemiddeld gewicht berekend worden als een baby erg beweeglijk is.

Opmerking: Als een baby te veel beweegt kan soms de gemiddelde waarde niet berekend worden.

- ♦ Zet de weegschaal aan door op de **[ON/OFF]** toets te drukken. De weegschaal gaat door het software programma en test zichzelf. Controle is klaar als software versie verschijnt. Schaal is gereed om te wegen als „**0,00 kg**” verschijnt.
- ♦ Leg de baby in het midden van de weegschaal
- ♦ Druk op de **[HOLD]** toets. Zolang de driehoek knippert op de display is de weegschaal het gemiddelde aan het berekenen, tot de waarde verschijnt.
- ♦ Druk opnieuw op de **[HOLD]** toets om de weegschaal naar de normale weegstand terug te laten keren.
- ♦ De **[HOLD]** toets kan op ieder gewenst moment worden in gedrukt

INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK OPLADER


U kunt de oplader in plaats van de batterijen gebruiken.
Altijd ZONDER batterijen in het batterijvak !

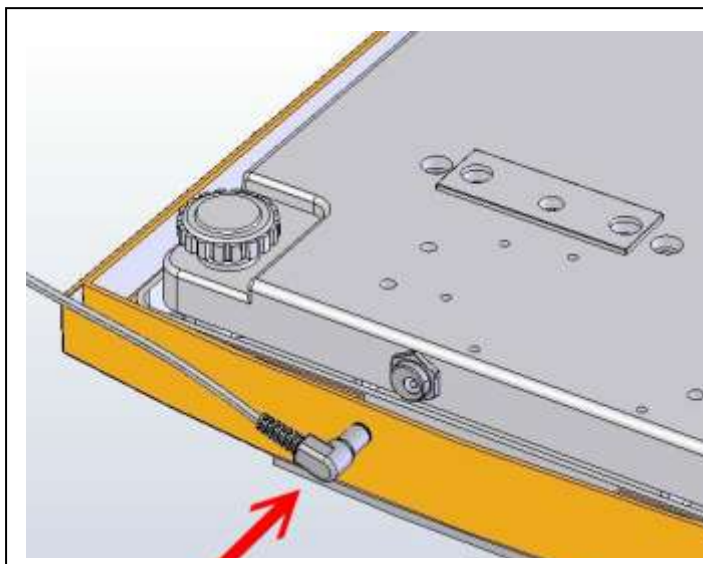


Attentie :

Steek de adapter plug eerst in de display, voordat de stekker in het contact wordt gedaan.


INSTRUCTIE VOOR VERVANGEN BATTERIJ

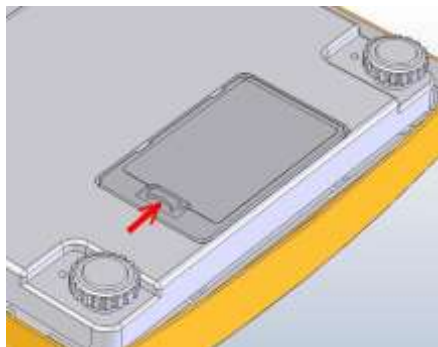


1. Verwijder batterij klepje

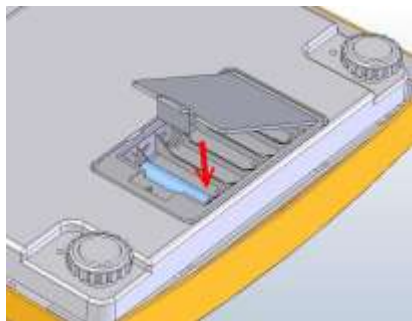

2. Vervang de batterijen.

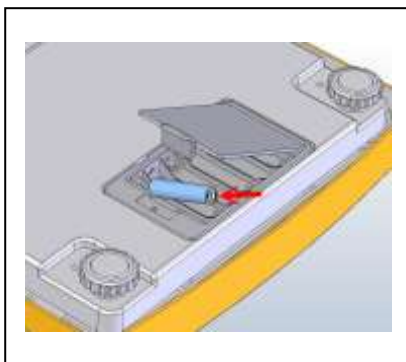

3. Controleer of batterijen correct geplaatst zijn

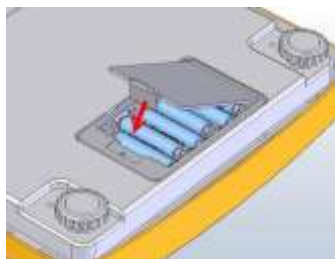


4. Sluit het klepje en draai weegschaal om.

ERROR BERICHTEN

■ Batterij leeg:

Dit verschijnt als het voltage van de Batterijen te laag wordt.

Vervang de batterijen of gebruik een adaper.

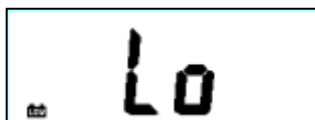


■ Gewicht error (te laag):

Het minimum gewicht is lager dan toegestaan.

Plaats een hoger gewicht.

Als het probleem blijft meldt dit aan Medische Techniek

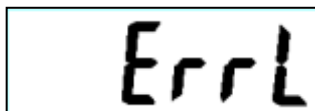


■ Gewicht error (te hoog):

Het gewicht is hoger dan toegestaan.


Plaats een lager gewicht.

Als het probleem blijft meldt dit aan Medische Techniek

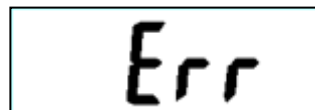

■ EEPROM Error:

Programma fout, bel Medische Techniek,
Of gebruik de online service manager.

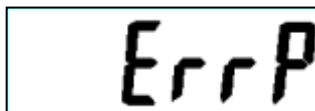

PROBLEEM OPLOSSEN

Tips :

Sommige problemen kunnen door de gebruiker herkend worden en kunnen een oplossing bieden:

1. Weegschaal start niet

- Check of de oplader goed is aangesloten.
- Check of de batterij nog goed is of vervang eerst de batterij.

2. Indicator toont “0000” . Kan niet naar nul terug keren.

- Weegschaal moet meestal opnieuw gekalibreerd worden. Neem contact op met Medische Techniek
- Onstabiele ondergrond, staat niet goed waterpas.
- Stoel staat ergens tegenaan of er zit vuil in weeggedeelte

Als de volgende problemen optreden neemt u direct contact op met uw technische dienst of MT. Of meld direct aan Prior Medical met de online service manager.


1. POWER schakelaar kapot /werkt niet

2. LCD display doet het niet

NOTITIE

Manufacturer’s Declaration of Conformity

This product has been manufactured in accordance with the harmonized European standards, following the provisions of the below stated directives:

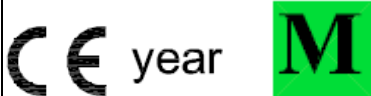	93/42/EEC as amended by 2007/47/EC Medical Device Directive
	2009/23/EC Non-automatic Weighing Instruments Directive

Please see separate document showing on sticker of device for above CE marking.

Authorized EU Representative:



Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.

Manufactured by:



CHARDER Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City 412,Taiwan (R.O.C.)

BENELUX : Prior Medical Systems, info@prior-medical.com