



PMS 5900

Medische Weegschaal

Korte gebruiksaanwijzing



Altijd op de afdeling houden voor nieuwe gebruikers


INHOUD

INHOUD	1
STROOM & BATTERIJ	2
BEDIENING EN LCD DISPLAY	3
GEBRUIK VAN DE HOLDFUNCTIE	4
GEBRUIK GEHEUGEN FUNCTIE.....	4
STROOMVOORZIENING	5
INSTALLEREN BATTERIJ	5
ERROR MELDINGEN (TD).....	6
CE VERKLARING	7

Stroom voorziening en batterij laag

1. De PMS 5900 Baby weegschaal werkt op s 6 x AA alkaline batterijen.
2.  (lege batterij indicatie) Verschijnt op de display als de baatteij onvoldoende stroom geeft.
3. Als  verschijnt, dient u de batterijen te vervangen. Zie ook "INSTALLEREN BATTERIJ" op pagina 16.

Bediening en LCD DISPLAY

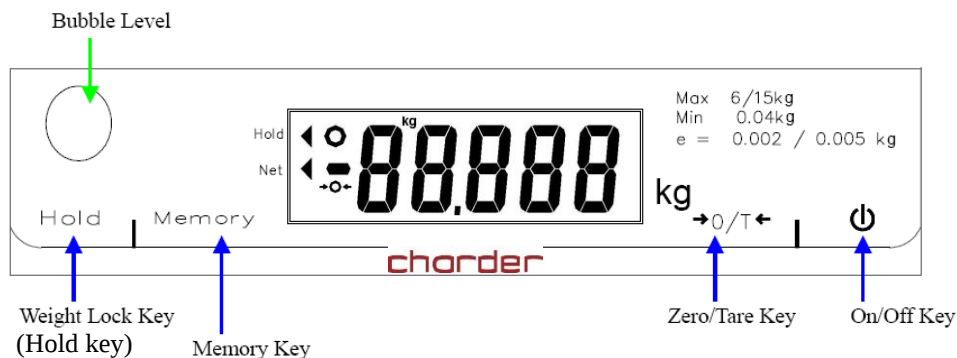

LCD DISPLAY

1. **○**: Schaal is stabile
2. **■**: Minimum gewichtswaarde
3. **→○←**: Nulstand

Omschrijving belangrijkste functies:

1. ON/OFF:

Aan / uit zetten weegschaal.

2. ZERO/TARE:

Om schaal op nul te zetten ($\pm 2\%$ max. capaciteit) en voorwerpen te tarreren alvorens de baby te wegen.

3. HOLD: weight lock key

Druk op deze knop om gewicht te fixeren voor of tijdens wegen, druk op HOLD knop opnieuw of verwijder baby of voorwerp (Tarra gewicht ook) van het plateau; display zal dan naar nul terug keren.

4. MEMORY:

Druk op deze knop om laatste gewicht te zien.

Gebruik van de Hold functie

1. Druk op HOLD knop om de hold mode te starten.
2. De pijl wijzend op de hold zal beginnen te knipperen en scherm zal "HOLD" tonen.
3. Plaats de baby in het midden van de schaal; de weegschaal zal het gemiddelde gewicht van de baby berekenen tot gewicht verschijnt.
4. Nadat het gewicht is getoond, druk opnieuw op HOLD knop om naar nul terug te keren. U bent dan weer in de normale weeg functie (de pijl wijzend op hold is verdwenen.)

Opmerking:

- A. Als de (Hold) functie is ge-activeerd, kunnen alle andere functies niet gebruikt worden.
- B. Nadat een waarde is vastgesteld en voorwerp is nog steeds op de schaal. Druk HOLD knop om hold uit te schakelen, of druk op TARE knop om hold uit te schakelen en tarra vast te leggen.
- C. Voordat een waarde is vastgelegd, drukken op de TARE knop zal alleen de TARRA uitvoeren. DE HOLD functie blijft operationeel.



Gebruik van de geheugenfunctie

1. PMS 5900 slaat automatisch het laatste gemeten gewicht op, indien de HOLD functie is gebruikt. Bij normaal wegen kan op de memory knop gedrukt worden om laatst vastgelegde gewicht te tonen.
2. Het laatste vastgelegd gewicht blijft in geheugen na uitzetten.

Stroom voorziening

PMS 5900 werkt op 6 x AA alkaline batterijen. Als u de weegschaal op batterijen wilt gebruiken, plaats de batterijen dan volgens onderstaande instructie.

INSTALLEREN BATTERIJ

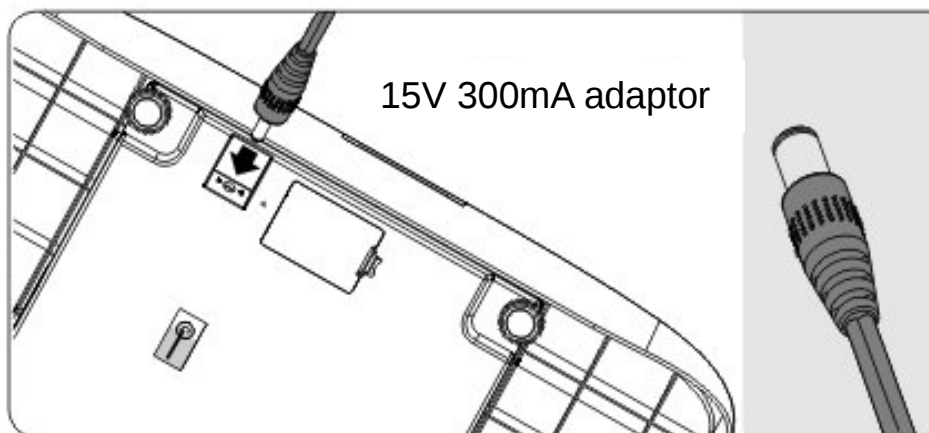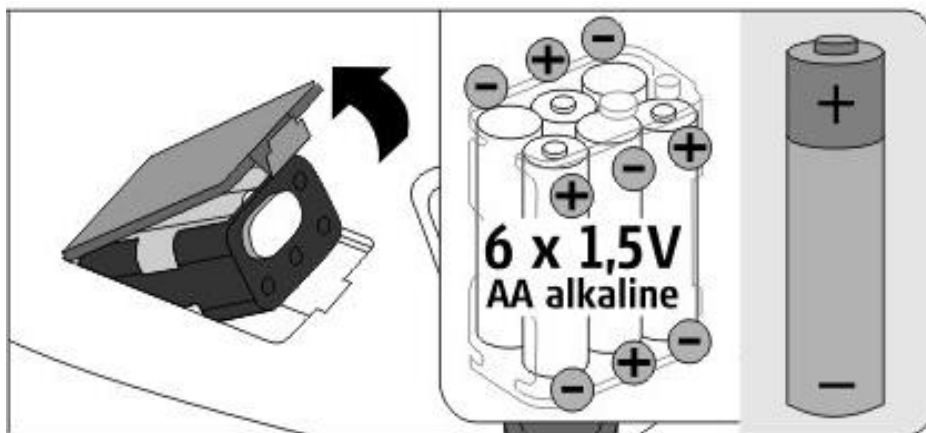


U kunt ook een oplader (inclusief)gebruiken.

ERROR Meldingen

FOUTMELDING	REDEN	HANDELING
	Batterij bijna leeg: de batterijen hebben te weinig spanning om de weegschaal nog te laten functioneren.	Vervang de batterijen of sluit de weegschaal met de adapter aan op netstroom.
	Overload: De last op de weegschaal is zwaarder dan de maximum capaciteit van de weegschaal.	Verlaag de last en probeer opnieuw te wegen.
	Counting error (too high): Dit geeft aan dat het signaal van de loadcell te sterk is.	Dit betekent vaak dat er een probleem is met de load cell of de bedrading. Neemt u contact op met u onderhoudspartner voor een oplossing.
	Counting error (too low): Dit geeft aan dat het signaal van de loadcell te zwak is.	Dit betekent vaak dat er een probleem is met de load cell of de bedrading. Neemt u contact op met u onderhoudspartner voor een oplossing.
	Weegschaal kan niet terugkeren naar het gekalibreerde nulpunt.	Kalibreer de weegschaal opnieuw. Neemt u hiervoor contact op met u onderhoudspartner.
	Weegschaal kan niet terugkeren naar het gekalibreerde nulpunt.	Kalibreer de weegschaal opnieuw. Neemt u hiervoor contact op met u onderhoudspartner.
	EEPROM Error: Dit geeft aan dat er een probleem is met de software van de weegschaal.	Dit betekent vaak dat er een probleem is met de load cell of de bedrading. Neemt u contact op met u onderhoudspartner voor een oplossing.

Manufacturer’s Declaration of Conformity

This product has been manufactured in accordance with the harmonized European standards, following the provisions of the below stated directives:

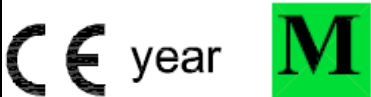	93/42/EEC as amended by 2007/47/EC Medical Device Directive
	2009/23/EC Non-automatic Weighing Instruments Directive

Please see separate document showing on sticker of device for above CE marking.

Authorized EU Representative:

EC

REP

Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street
LONDON, W1G 9QR, U.K.

Prior



Medical Systems

info@prior-medical.com /+31-844300044

Manufactured by:



Charder Electronic Co., Ltd.
No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City 412 ,Taiwan (R.O.C.)

