

Prior Medical Systems



PMS 6000
Medische bedweegschaal
Gebruiksaanwijzing
Gebruiker kort

INHOUDSOPGAVE

Toetsenbord.....	2
Gebruik weegschaal.....	2
Errormeldingen en probleem oplossen.....	4

TOETSENBORD



GEBRUIK WEEGSCHAAL

WEGEN

- ♦ Start de weegschaal **[ON/OFF]** toets. De weegschaal gaat door het software programma en test zichzelf. Controle is klaar als software versie verschijnt. Schaal is gereed om te wegen als „0,00 kg” verschijnt.

Opmerking: met de **[→0←]** toets kan de weegschaal altijd op nul worden gezet.

- ♦ Laat de persoon in het midden van de rolstoel plaatsnemen. Wacht tot het stabiel teken (o) op de display verschijnt en het gewicht wordt getoond.

Opmerking:

Als een persoon zwaarder is als het maximum , dan verschijnt er een „Err” symbool (= overload).

TARREREN

Het gewicht van een additioneel voorwerp kan getarreerd worden door op de “tare” toets te drukken. Daarna wordt alleen het gewicht van de te wegen persoon getoond.

- ♦ Bijv. Als er een kussen op de stoel wordt gelegd, dan toont de weegschaal het gewicht van het kussen.
- ♦ Om het tareren te starten druk op de **[TARE]** toets. Nu wordt het gewicht van het kussen opgeslagen en de **0.0 kg** waarde verschijnt
- ♦ Laat de persoon in het midden van de stoel plaatsnemen.
- ♦ Lees het gewicht op de display.

Opmerking:

De weegschaal kan maar 5 tarra waardes opslaan

Als de weegschaal niet beladen is dan zal een min gewicht getoond worden

Om de tarra waarde te wissen, verwijder ieder voorwerp op de stoel en druk op de **[TARE]** toets

HOLD Met de Hold functie kan het gemiddeld gewicht berekend worden als een persoon niet blijft zitten


Als een persoon te veel beweegt kan soms de gemiddelde waarde niet berekend worden.

- ♦ Zet de weegschaal aan door op de **[ON/OFF]** toets te drukken. De weegschaal gaat door het software programma en test zichzelf. Controle is klaar als software versie verschijnt. Schaal is gereed om te wegen als „**0,00 kg**” verschijnt.
- ♦ Laat de persoon in het midden van de stoel plaatsnemen.
- ♦ Druk op de **[HOLD]** toets. Zolang de driehoek knippert op de display is de weegschaal het gemiddelde aan het berekenen, tot de waarde verschijnt.
- ♦ Druk opnieuw op de **[HOLD]** toets om de weegschaal naar de normale weegstand terug te laten keren.
- ♦ De **[HOLD]** toets kan op ieder gewenst moment worden in gedrukt

ERROR MELDINGEN

■ Batterij leeg:

Dit verschijnt als het voltage van de Batterijen te laag wordt.
Vervang de batterijen of gebruik een adaper.

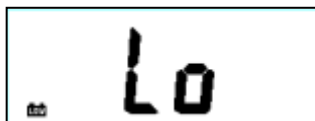


■ Gewicht error (te laag):

Het minimum gewicht is lager dan toegestaan.

Plaats een hoger gewicht.

Als het probleem blijft meldt dit aan Medische Techniek

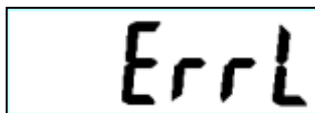


■ Gewicht error (te hoog):

Het gewicht is hoger dan toegestaan.


Plaats een lager gewicht.

Als het probleem blijft meldt dit aan Medische Techniek

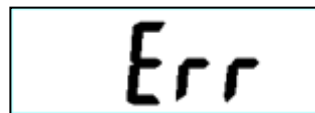

■ EEPROM Error:

Programma fout, bel Medische Techniek,
Of gebruik de online service manager.

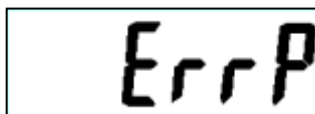

PROBLEEM OPLOSSEN

Tips :

Sommige problemen kunnen door de gebruiker herkend worden en kunnen een oplossing bieden:

1. Weegschaal start niet

- Check of de oplader goed is aangesloten.
- Check of de batterij nog goed is of vervang eerst de batterij.

2. Indicator toont “0000” . Kan niet naar nul terug keren.

- Weegschaal moet meestal opnieuw gekalibreerd worden. Neem contact op met Medische Techniek
- Onstabiele ondergrond, staat niet goed waterpas.
- Stoel staat ergens tegenaan of er zit vuil in weeggedeelte

3. Geen goede verbinding met PC of printer

- Kabel niet goed of niet goed verbonden.
- Verkeerd indicator protocol
- Interne kabel gebroken

Indien de volgende problemen optreden neemt u direct contact op met uw technische dienst of MT. Of meld direct aan Prior Medical met de online service manager.

1. POWER schakelaar kapot /werkt niet

2. LCD display doet het niet


3. Pieper werkt niet

Per email :

info@prior-medical.com of service@prior-medical.com

Manufacturer's Declaration of Conformity

This product has been manufactured in accordance with the harmonized European standards, following the provisions of the below stated directives:

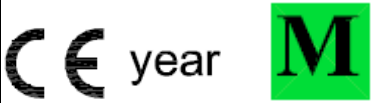	93/42/EEC as amended by 2007/47/EC Medical Device Directive
	2009/23/EC Non-automatic Weighing Instruments Directive

Please see separate document showing on sticker of device for above CE marking.

Manufactured by:



Charder Electronic Co., Ltd.

No.103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City 412, Taiwan (R.O.C.)

FDA no.: D051883 / 3007074192