



Prior Medical Systems

Korte instructie PMS 6110



Belangrijk ; lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing !


Let op :

Niet voor gebruik buiten, alleen binnenshuis gebruik



Stap op het midden, niet op de rand


Schaal op vlakke ondergrond plaatsen

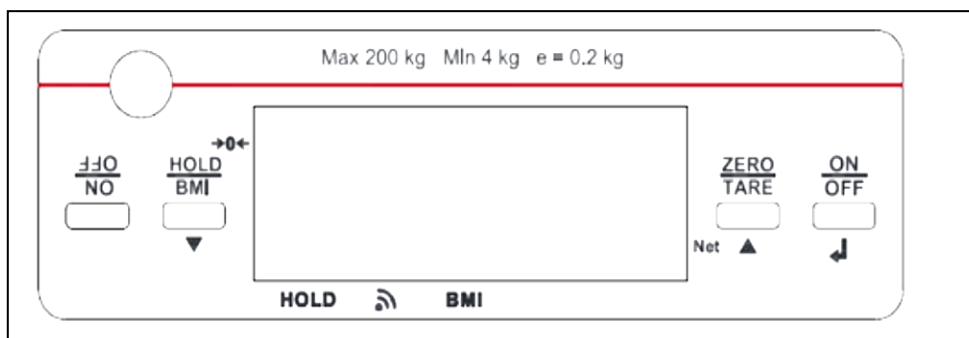

Stappen :

1

U heeft nodig voor voeding :

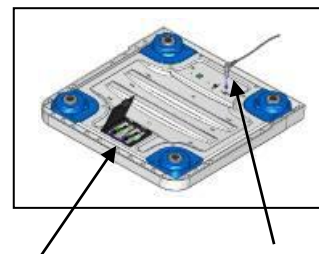

4 x AA batterijen of oplader

2

Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond




en zorg dat de luchtbel in het in het midden van de cirkel is.



Prior Medical Systems


3

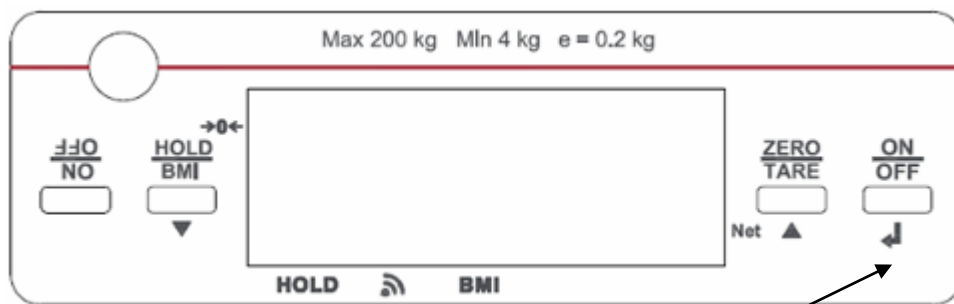

Zet de weegschaal aan en wacht op nul waarde.

Aanzetten kan door de weegschaal door de voet kort op de weegschaal te zetten.

4

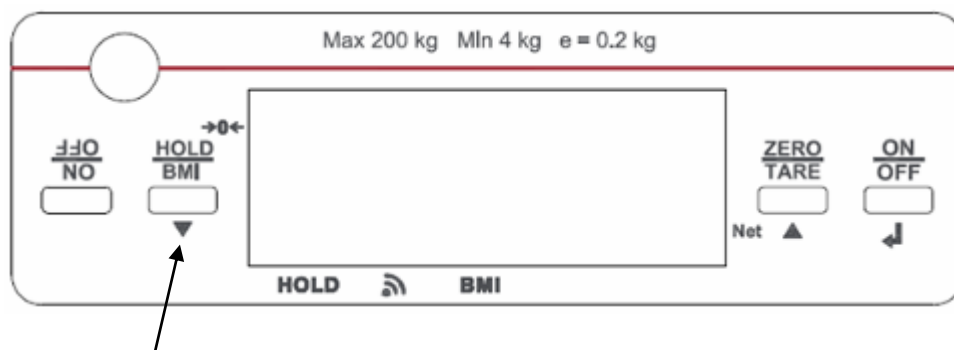

Druk op **hold** om gewicht vast te houden. Na te piep is gewicht stabiel.

Belangrijke functies

Toets	Omschrijving
ON/OFF	Aan / uit knop
ZERO/ TARE	Zero weegschaal (<2% of the capaciteit) Tarra (>2% of the capaciteit)
HOLD/BMI	Gewicht vast houden