

Prior Medical Systems B.V.
Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn
info@prior-medical.com


Prior Medical Systems







Prior 2510 W
FM 651 IURN


Gebruiksaanwijzing

Werkt optimaal met de app




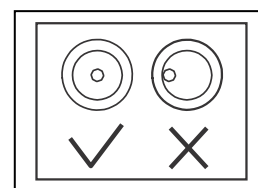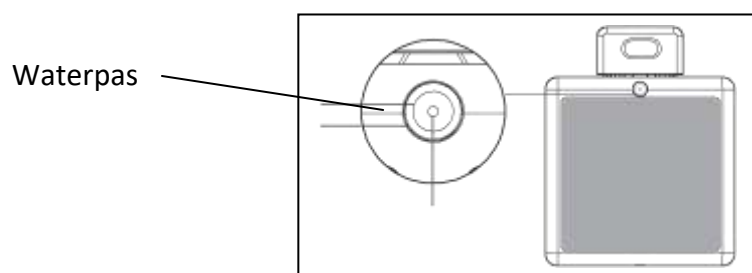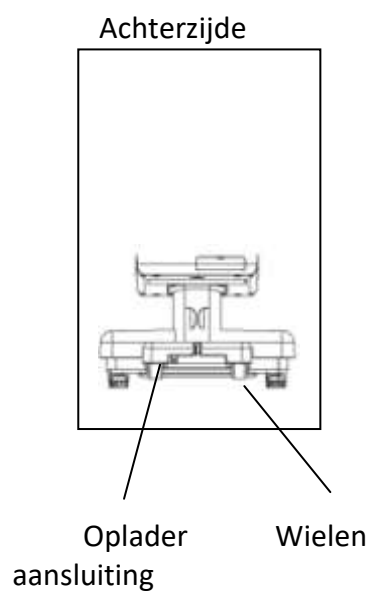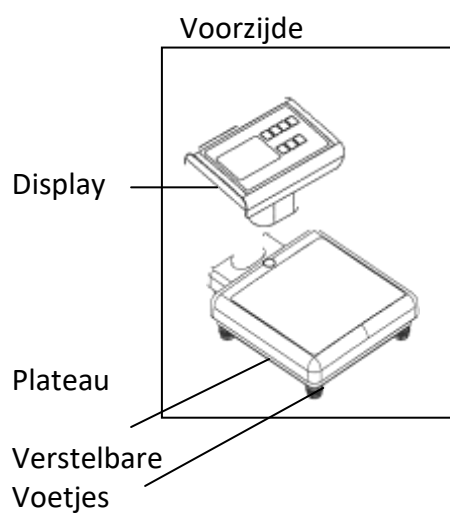

Luchtbel in midden is

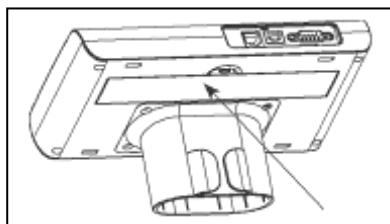


Batterij compartiment 6 AA

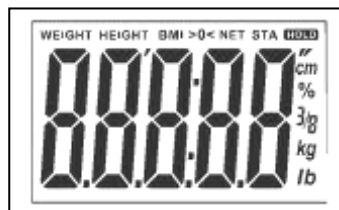

Display

WEIGHT	Weeg mode	HEIGHT	Lengte mode
BMI	BMI mode	>0<	Toont of weegschaal in nulstand is
NET	Tarra functie in gebruik	STA	Toont of gewicht stabiel is
HOLD	Toont gemiddeld hold gewicht		

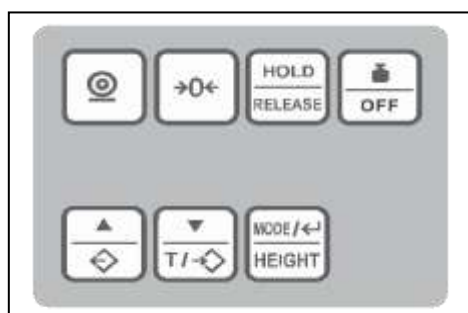

Toetsen



Printen resultaat (sommige modellen)



Weegschaal terug naar nul



Hold functie activeren / uitzetten



Start weegfunctie, aan/uit



Aan / uit in functie menu, zoeken geheugen, gewicht



Gegevens uit menu ophalen

Werkt optimaal met de app




Alvorens de weegschaal te gebruiken

1. Stroom aansluiten of batterijen plaatsen

Plaats 6 stks 1.5V AA alkaline batterijen (niet in verpakking) in het batterij compartiment aan de achterkant van de aflezer, of verbindt de weegschaal met netstroom met een adapter AC/DC 9V (alleen bij Prior 400W) aan de achterkant

2. De juiste positie

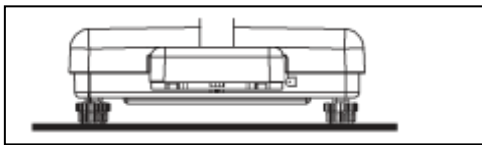

Gebruik weegschaal op vlakke ondergrond.



Ga in het midden van de weegschaal staan


3. stel de weegschaal waterpas

. De weegschaal uitbalanceren..

Voor gebruik moet de weegschaal eerst waterpas staan

A. Er mag niets op de weegschaal staan voor dat de weegschaal waterpas staat.

B. Plaats de weegschaal altijd op een stabiel en vlak oppervlak. Gebruik de verstelbare voetjes om de luchtbel in het midden van de waterpas cirkel te positioneren

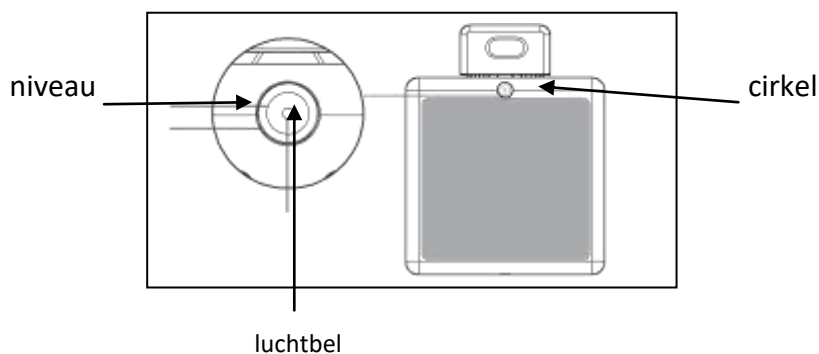

Werkt optimaal met de app



4. De weegschaal opstarten

Zodra de weegschaal wordt aangeschakeld zullen binnen een paar seconden getallen verschijnen (Fig.1), en de software versie (Fig.2) en 0 punt. Daarna schakelt de weegschaal automatisch uit en is klaar voor gebruik



Fig 1.



Fig. 2

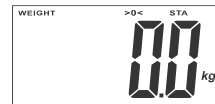


Fig. 3

WEGEN

1. Druk op [ON/OFF] toets om de schaal aan te zetten, cijfers (Fig.1) en software versie (Fig.2) worden zichtbaar op de display, dan "0" wordt zichtbaar (Fig.3).



Fig.4

2. Dan verschijnt "0.0kg" op de display met "weight" indicatie (Fig.5).

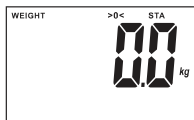


Fig.5

3. Stap op de weegschaal en sta stil terwijl het gewicht wordt gemeten. "STA" verschijnt om aan te geven dat het gewicht stabiel is (Fig.6)

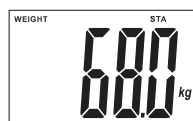


Fig. 6

HOLD FUNCTION

1. Volg de stappen 1-3 van de weegfunctie.
2. Druk op hold en de weegschaal zal het gewicht 20 seconden vast houden (Fig.7).



Fig. 7

Problemen oplossen

1. Er gebeurt niets.

Controleer of weegschaal onder stroom staat,
Zie **“ALVORENS TE GEBRUIKEN”**.
Controleer de batterijen

2. De display toont “LobAt”

Batterij niveau lag, vervang de batterijen .

3. De Display toont “Err 0”.

Initiële zero is te groot. Kijk of er geen gewicht op het platform is . Indien niet, verwijder gewicht .

4. Display toont “Err 2” tijdens wegen.

Overgewicht waarschuwing. Verwijder gewicht onmiddellijk; anders, kan er blijvende schade ontstaan

5. Kan gewicht niet vasthouden

Druk opnieuw op>**HOLD**

6. Display toont “Err 6”.

Apparaat fout. Neem contact op met de leverancier

7. Display toont “uStb” tijdens wegen.

Onstabiele nul. Stap van de schaal af en stap nogmaals op.

8. Nadat ik correcties heb gedaan, blijft het problem bestaan.

Als het probleem blijft schakel de stroom 1 minuut uit en probeer het nogmaals.

9. Display toont “Adc”.

Apparaat fout. Neem contact op met de leverancier.

9. Display toont “EEP”.

Apparaat fout. Neem contact op met de leverancier

. Nadat ik correcties heb gedaan, blijft het problem bestaan.

Neem contact op met de leverancier.

