



Prior Medical Systems

Gebruiksaanwijzing

Stoelweegschaal



Prior 3001 / BW-3146AK



. Voordat u begint:

Voeding:

- * Voedingsbron : Adapter input 220V AC/50Hz/200mA; output 7.5V DC/1A.
- * Gebruikstemperatuur : -10°C~ 40°C.
- * Batterij : 6 x AA batterijen. (adapter zonder batterijen gebruiken !)

Opmerkingen voor gebruik:

1. Produkt is alleen geschikt voor normaal gebruik binnen gebouwen.
2. Gebruik de oplader niet in combinatie met batterijen !


Reiniging:

Voordat u gaat reinigen, moet de weegschaal uitgeschakeld zijn.

1. Gebruik geen grote hoeveelheden water om te reinigen. Klamvochtig reinigen heeft de voorkeur.
2. Gebruik mild alcalische reinigingsprodukten.
3. Reiniging met klamvochtige doeken heeft de voorkeur.



2. Display:

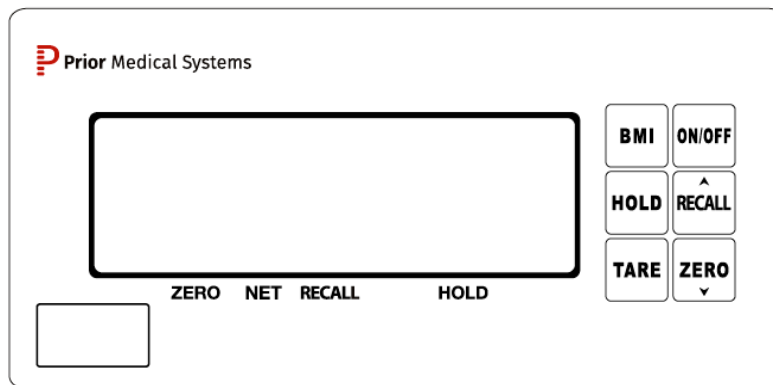

Toets / FUNCTIES:

-  BMI.
-  Laatste meting.
-  Hold toets
-  Tarra Toets.
-  Nultoets
-  Power on/off.

SYMBOLLEN:

-  Stabiel aan
- ZERO Nul aan
- HOLD (Hold) aan
- kg gewichtseenheid(kg).



3. Toetsfuncties:

1.  Body Mass Index.
 - 1) Display staat op "0", laat persoon op platform staan /zitten. Zodra waarde stabiel is, toont de display het gewicht.
 - 2) Toets  In en druk op   toets om de lengte van de persoon.
Druk op  toets om BMI af te lezen.
 - 3) De BMI waarde verdwijnt zodra de persoon van de stoel afstapt.
2.  Druk  toets om laatste waarde te zien.
Opmerking: werkt alleen als display in 0 kg mode is.
3.  Handmatig Hold/Auto Hold:
In 0.00 kg mode, kunt u kiezen tussen handmatig of autohold door indrukken van  key.
In auto hold, toont het display Auto; in handmatige hold, toont het display Hold OFF.
 1. Handmatig Hold:
Laat persoon gaan zitten. Wacht tot het gewicht stabiel is en druk op de hold toets om het gewicht vast te zetten. Nadat de persoon uit de stoel opstaat zal het display na 1 seconde 0.0 kg tonen en kunt u de waarde oproepen door weer op de hold toets te drukken
 2. Auto Hold:
Laat persoon gaan zitten. Wacht tot het gewicht stabiel is en de weegschaal zal automatisch het gewicht vastzetten en tonen.
4.  **TARE wordt gebruikt om voorwerpen te tarreren zodat alleen het gewicht van de patiënt wordt getoond.**
(Bijv. kussens of handdoeken)
 - 1) Plaats het voorwerp op de stoel en druk op de  toets .
Het display toont **nett**
 - 2) Verwijder het voorwerp en druk weer op de  toets
5.  Nul toets.
Het display toont geen "nul", druk op  toets voor nulwaarde.
6.  Aan/Uit.