

Korte Gebruiksaanwijzing


Rolstoelweegschaal



Prior 7000/ BW-5164



2. Display:

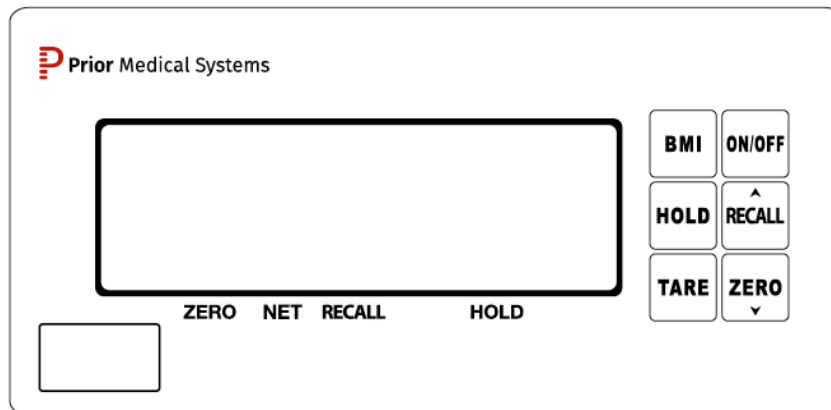

Toets / FUNCTIES:

-  BMI.
-  Laatste meting.
-  Holdtoets
-  Tarra Toets.
-  Nultoets
-  Power on/off.

SYMBOLLEN:

-  Stabiel aan
- ZERO Nul aan
- HOLD (Hold) aan
- kg gewichtseenheid(kg).

3. Toetsfuncties:

1.  Body Mass Index.
 1) Display staat op "0", laat persoon op platform staan /zitten. Zodra waarde stabiel is, toont de display het gewicht.
 2) Toets  In en druk op   toets om de lengte van de persoon.
 Druk op  toets om BMI af te lezen.
 3) De BMI waarde verdwijnt zodra de persoon van de stoel afstapt.
2.  Druk  toets om laatste waarde te zien.
 Opmerking: werkt alleen als display in 0 kg mode is.
3.  Handmatig Hold/Auto Hold:
 In 0.00 kg mode, kunt u kiezen tussen handmatig of autohold door indrukken van  key.
 HOLD
 In auto hold, toont het display Auto; in handmatige hold, toont het display Hold OFF.
 1. Handmatig Hold:
 Laat persoon gaan zitten. Wacht tot het gewicht stabiel is en druk op de hold toets om het gewicht vast te zetten. Nadat de persoon uit de stoel opstaat zal het display na 1 seconde 0.0 kg tonen en kunt u de waarde oproepen door weer op de hold toets t drukken
 2. Auto Hold:
 Laat persoon gaan zitten. Wacht tot het gewicht stabiel is en de weegschaal zal automatisch het gewicht vastzetten en tonen.
4.  **TARE wordt gebruikt om voorwerpen te tarreren zodat alleen het gewicht van de patiënt wordt getoond.**
 (Bijv. kussens of handdoeken)
 1) Plaats het voorwerp op de stoel en druk op  toets .
 de
 Het display toont **nett**
 2) Verwijder het voorwerp en druk weer op de  toets
5.  Nul toets.
 Het display toont geen "nul", druk op  toets voor nulwaarde.
6.  Aan/Uit.

Error meldingen

1. Er gebeurt niets.

Controleer of weegschaal onder stroom staat,
Controleer de batterijen

2. De Display toont "Err 4".

Initiële zero is te groot. Kijk of er gewicht op het platform is . Indien ja, verwijder gewicht .

3. Display toont "Err 4" tijdens wegen.

Overgewicht waarschuwing. Verwijder gewicht onmiddellijk; anders, kan er blijvende schade ontstaan

4. Display toont "Err 5" tijdens wegen.

Ondergewicht waarschuwing. zet weegschaal uit en start opnieuw.

5. Display toont "Err 7".

Loadcell problem, check of kabel goed is aangesloten. Als kabel ok is, neem contact op met de leverancier

6. Error 9 :

Weegschaal gaat niet naar initiële nul

Oorzaken :

- a. Gewicht over de maximale capaciteit gewogen
- b. Kabel breuk
- c. Loadcell beschadigd

Oplossing:

1. Druk op ZERO toets om te controleren of schaal terugkeert naar "0"
2. Controleer de aansluitingen van de kabel naar de aflezer.
3. Kalibreer de weegschaal opnieuw, zie punt 4.
4. Indien dit niet werkt dient een gekwalificeerde monteur voor reparatie te komen.